



## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA BATERIA

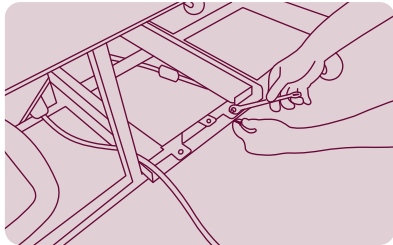


1

Retire os parafusos e puxe o suporte da bateria, deixando-o inclinado.

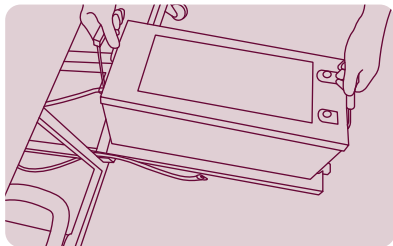


2

Coloque a bateria dentro do suporte e empurre-o cuidadosamente até que o suporte e a bateria estejam totalmente acondicionados dentro do compartimento.

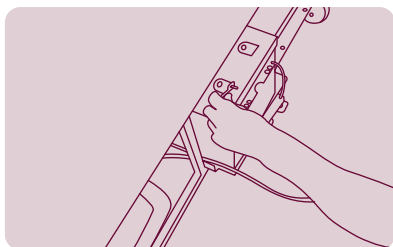

3

Conecte os cabos positivo (+) e negativo (-) firmemente utilizando uma chave de boca nº 10 (acompanha o manual do usuário).

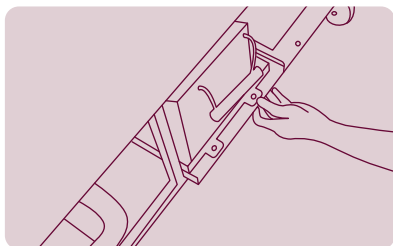


4

Recoloque os parafusos de fixação do suporte.


**ATENÇÃO: PARA LIGAR A(S) BATERIA(S) DESLIGUE A CHAVE GERAL DO EQUIPAMENTO E LIGUE PRIMEIRAMENTE O(S) CABO(S) POSITIVO(S).**




ESQUEMA DE LIGAÇÃO  
PARA UMA BATERIA

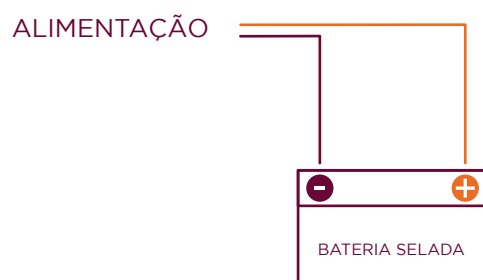

ESQUEMA DE LIGAÇÃO  
PARA DUAS BATERIAS

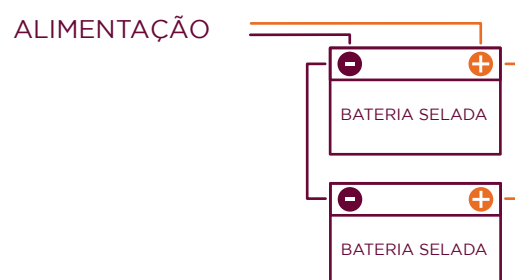


## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA BATERIA

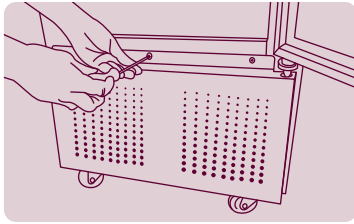


1

Retire os parafusos de fixação da grade frontal utilizando uma chave Phillips (acompanha o manual do usuário).

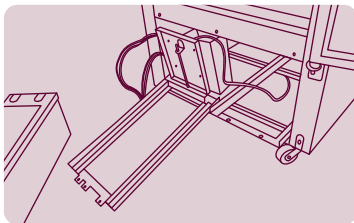


2

Puxe o suporte de bateria deixando-o inclinado.

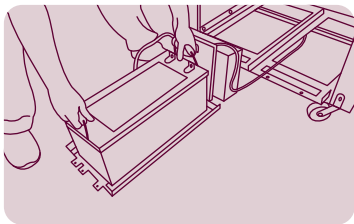


3

Coloque a bateria dentro do suporte, mantendo-a inclinada.

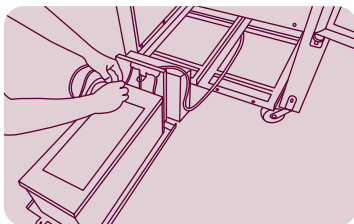

4

Conecte os cabos positivo (+) e negativo (-) firmemente utilizando uma chave de boca nº 10 (acompanha o manual do usuário).

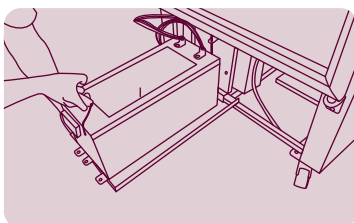

5


Empurre cuidadosamente o suporte com a bateria até que a mesma esteja totalmente acondicionada dentro do compartimento. Feche a grade frontal utilizando uma chave Phillips.

**ATENÇÃO: PARA LIGAR A(S) BATERIA(S) DESLIGUE A CHAVE GERAL DO EQUIPAMENTO E LIGUE PRIMEIRAMENTE O(S) CABO(S) POSITIVO(S).**



ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA UMA BATERIA

ALIMENTAÇÃO

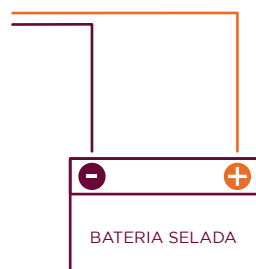

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA DUAS BATERIAS

ALIMENTAÇÃO

